

ODDENT[®]

ALIVIA TU BOCA

Reduce el dolor y favorece la reparación de aftas y heridas bucales profundas localizadas

Indicado para su aplicación en aftas y heridas profundas y durante la fase postoperatoria.

Diseñado específicamente para garantizar un uso sencillo, rápido y eficaz.

El ácido hialurónico es el proteoglicano fisiológicamente más importante que se encuentra de forma natural en la matriz extracelular de la mucosa, donde interactúa con otros componentes del tejido conectivo para proporcionar la resistencia y elasticidad esenciales para una buena salud oral.

El ácido hialurónico posee diversas propiedades beneficiosas que contribuyen al éxito de un programa de tratamiento dental e higiene oral. En concreto, el ácido hialurónico puede absorber una cantidad de agua equivalente a 50 veces su peso seco.

Esta característica permite al ácido hialurónico actuar como barrera contra la penetración de microorganismos y otras toxinas que pueden contribuir a la etiología de la enfermedad periodontal.

ODDENT[®] Gel Oral Forte

- Contiene como fuente de ácido hialurónico un derivado no animal fabricado biotecnológicamente, de alta pureza y calidad, en forma de sal de sodio de alto peso molecular.
- Tiene una acción local de duración prolongada.
- Se adhiere a la membrana mucosa debido a la naturaleza especial de la formulación del producto.
- Pueden utilizarlo, tras consejo médico, todos los pacientes sin restricciones, incluidos los niños, las mujeres embarazadas, los diabéticos y personas de edad avanzada.

Indicaciones

- Reduce el dolor y el malestar, sobre todo después de traumatismos, aftas profundas, intervenciones quirúrgicas o periodontales, implantes, extracciones dentales y alisado radicular subgingival.
- Promueve y acelera los procesos antiedematosos y antiinflamatorios.

- Para su utilización en heridas que pueden cicatrizar por segunda intención (sin necesidad de sutura).

Instrucciones de uso

Inmediatamente después del tratamiento dental, aplicar una pequeña cantidad de gel directamente con la cánula en el área afectada o, después de lavarse bien las manos, aplicar el gel minuciosamente con el dedo y masajear suavemente la encía hasta que el área afectada esté completamente cubierta. Usar 1-2 veces al día, o cuando se necesite, a menos que su doctor indique lo contrario. Inocuo en caso de ingestión.

Composición

Ingrediente principal: Hialuronato de sodio.

Otros componentes: Agua, xylitol, goma celulósica, alcohol, aceite de ricino hidrogenado PEG 40, colina alfoscerato, fosfato de sodio monobásico, PVA, policarbofilo, alcohol diclorobencílico, EDTA disódico, lactato de sodio, hidróxido de sodio.

Envase

ODDENT® Gel Oral Forte tubo de 8 ml.

Contraindicaciones

El uso de **ODDENT® Gel Oral Forte** está contraindicado en caso de hipersensibilidad a alguno de sus componentes.

Advertencias y precauciones

No usar en caso de daño visible. Conservar a temperatura ambiente, protegido de fuentes de calor directas. No utilizar después de la fecha de caducidad. Mantener fuera del alcance de los niños. Si los síntomas persisten, consulte a un profesional sanitario.

Distribuidor:



Menarini Consumer
Healthcare, SAU
Guifré 724, 08918
Badalona (Barcelona)
Tel. +34 93 462 88 00
www.menarini.es

Fabricante:



RICERFARMA S.p.A.



Via Egadi, 7 - 20144 Milano IT
www.ricerfarma.com

Fabricado en la UE

